



NÁJDITE RIEŠENIE

System Reveal LINQ™

poskytuje lekárovi informácie
o vašom srdci počas každodenného života.



Medtronic

PREČO MÔŽE BYŤ DLHODOBÉ

MONITOROVANIE SPRÁVNYM RIEŠENÍM PRE VÁS

**Kľúčom k lepšej zdravotnej
starostlivosti sú presné informácie.**

Nepravidelný tep srdca sa však nemusí vyskytovať často, v dôsledku čoho je ťažké zistiť a liečiť ochorenie srdca, ktoré je jeho príčinou.

Teraz už máme riešenie. Vďaka priebežnému dlhodobému monitorovaniu môže lekár získať informácie o vašom srdci, ktoré mu pomôžu nájsť správne riešenie vášho stavu.



NEVYSVETLENÉ ODPADÁVANIE –

náhla strata vedomia, nazývaná aj omdlievanie alebo synkopa, ktorá nastáva, keď sa zníži krvný tlak a do mozgu sa nedostáva kyslík.

- **Prečo monitorovať?** Odpadávanie môže byť závažný stav, ak ho spôsobuje abnormálny srdcový rytmus.

SRDCOVÉ PALPITÁCIE –

obvykle neškodný stav, pri ktorom srdce akoby búšilo, rýchlo bije alebo sa chveje.

- **Prečo monitorovať?** Palpitácie môžu naznačovať závažné ochorenie srdca, ktoré je ich príčinou.

FIBRILÁCIA PREDSIENÍ –

stav, pri ktorom dochádza k veľmi rýchlym a nepravidelným sťahom horných srdcových dutín, čiže predsiení. Označuje sa aj ako AF (z angl. atrial fibrillation) alebo AFib.

- **Prečo monitorovať?** Pri fibrilácii predsiení je potrebná liečba, pretože úzko súvisí s cievnu mozgovou príhodou.

NEVYSVETLENÁ CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA –

cievna mozgová príhoda neznámej príčiny, ktorú môže vyvolať fibrilácia predsiení, v dôsledku ktorej sa vytvorí krvná zrazenina a zablokuje prívod kyslíka do mozgu.

- **Prečo monitorovať?** Zistenie fibrilácie predsiení po cievnej mozgovej príhode môže pomôcť lekárom predísť ďalšej príhode.

SYSTÉM REVEAL LINQ™

Systém Reveal LINQ zahŕňa malé implantovateľné zariadenie na monitorovanie srdcovej činnosti alebo ICM (z angl. implantable cardiac monitor), ktoré sa umiestňuje tesne pod kožu pomocou minimálne invazívneho zákroku, a zariadenie na monitorovanie pacienta MyCareLink™ umiestnené pri lôžku, v ktorom sa zhromažďujú údaje o srdcovom rytme zo zariadenia ICM a sú v ňom k dispozícii pre lekára.

- **Diskrétné** – Implantovateľné zariadenie na monitorovanie srdcovej činnosti Reveal LINQ nie je u väčšiny pacientov viditeľné.
- **Jednoduché** – Monitorovacie zariadenie MyCareLink využíva mobilný signál a elektrické napájanie.
- **Prenosné** – Chodte, kam len chcete. Môžete cestovať a vziať si monitorovacie zariadenie MyCareLink so sebou.
- **Kompatibilné s MRI** – Reveal LINQ ICM je možné bezpečne používať aj v prostredí MRI.
- **3 roky** – Reveal LINQ ICM zaznamenáva abnormálny srdcový rytmus počas 3 rokov.



Implantovateľné zariadenie
na monitorovanie srdcovej
činnosti Reveal LINQ



MyCareLink
Zariadenie na
monitorovanie pacienta

ZAZNAMENAJTE PRÍZNAKY OKAMŽITE PRI ICH VÝSKYTE

Lekár sa môže rozhodnúť, že pridá k systému Reveal LINQ zariadenie Pacientsky ovládač, ak chce porovnať určité údaje o srdcovom rytme s vašimi príznakmi.

Zariadenie Pacientsky ovládač je malé a používa sa na zaznamenanie príznakov v zariadení ICM Reveal LINQ. Monitorovacie zariadenie MyCareLink potom odošle tieto informácie pri ďalšom automatickom prenose.

Spoločnosť
Medtronic úzko
spolupracuje
s vašim lekárom
a hľadá riešenia
pre váš zdravotný
stav.



Zariadenie
Pacientsky ovládač



AKO FUNKUJE SYSTÉM REVEAL LINQ

Po implantácii **Reveal LINQ ICM** stačí nechať monitorovacie zariadenie MyCareLink zapojené, zapnuté a umiestnené tak, aby prijímalo potrebný mobilný signál.

SYSTÉM už sa postará o ostatné.



Proces odosielania informácií je jednoduchý a bez starostí.



Reveal LINQ ICM
zaznamenáva údaje o činnosti
srdca.



Monitorovacie zariadenie
MyCareLink sa musí
nachádzať v blízkosti vašej
postele.



Zaznamenané údaje sa
prenesú do monitorovacieho
zariadenia MyCareLink.



Lekár má prístup k týmto
údajom.



Lekár sa s vami v prípade
nutnosti skontaktuje.



ČO SI TREBA UVEDOMIŤ

Všetky chirurgické zákroky sú rizikové, ale riziká spojené so systémom Reveal LINQ sú zriedkavé. Keďže sa zariadenie ICM zavádza tesne pod pokožku, riziko infekcie alebo citlivosti je nízke. **Poradte sa so svojím lekárom o rizikách týkajúcich sa vášho zdravotného stavu a situácie.**

PREČO PRÁVE SYSTÉM REVEAL LINQ?

Systém Reveal LINQ prináša množstvo výhod.

- Proces zavádzania je minimálne invazívny a pritom jednoduchý a rýchly.
- Dlhodobé monitorovanie funguje priebežne.
- Schopnosť zachytiť zriedkavé alebo nepredvídateľné nepravidelné údery srdca pomáha pri diagnostike.
- Používanie systému Reveal LINQ si nevyžaduje žiadne zmeny v každodenných činnostiach.
- Zariadenie Reveal LINQ je možné bezpečne používať aj v prostredí MRI.

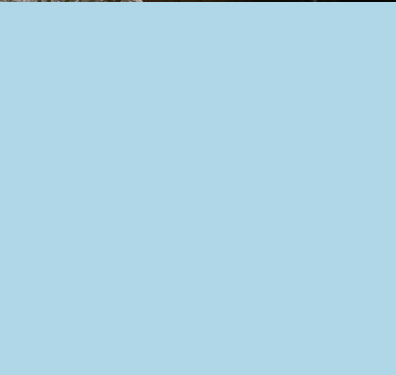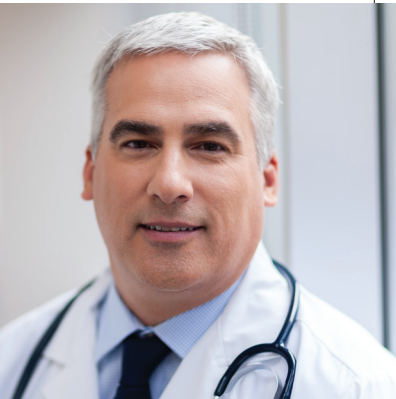

VIAC INFORMÁCIÍ

Spoločnosť Medtronic sa Vám usiluje
poskytovať tie najaktuálnejšie informácie
o systéme Reveal LINQ.




Viac informácií o možnostiach
dlhodobého monitorovania srdcovej
činnosti, príbehy pacientov
a odpovede na otázky o systéme
Reveal LINQ nájdete na adrese:
MonitorYourHeart.com/LINQ

Odborní pracovníci služby pre
pacientov sú k dispozícii na telefóne
od 7.00 do 19.00 (CST),
od pondelka do piatka.
1 (800) 551-5544





V prípade ďalších otázok o systéme Reveal LINQ alebo ak ste pripravení dohodnúť sa na zavedení zariadenia, obráťte na sa svojho lekára.

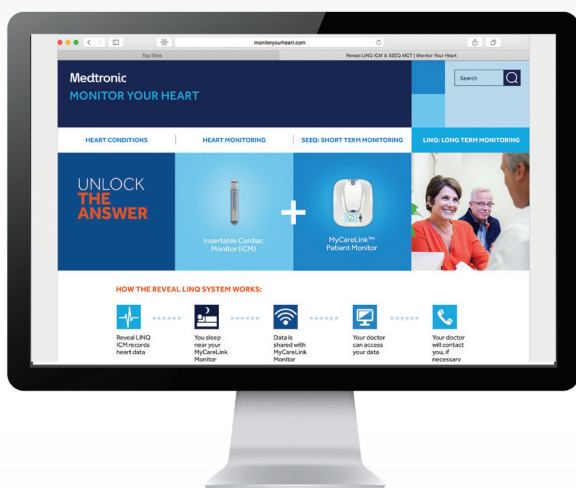

Monitorovacie zariadenie CareLink™ a sieť CareLink od spoločnosti Medtronic

Plánované použitie: Monitorovacie zariadenie CareLink™ a sieť CareLink sú určené na prenos údajov o pacientovi z niektorých implantovateľných pomôcok na monitorovanie srdcovej činnosti od spoločnosti Medtronic, a to podľa pokynov lekára a podľa opisu v príručke výrobu. Tieto výrobky nie sú v prípade núdze náhradou primeranej zdravotnej starostlivosti a mali by sa používať len podľa pokynov lekára.

Kontraindikácie: Nie sú známe žiadne kontraindikácie monitorovacieho zariadenia CareLink.

Výstrahy a upozornenia: Monitorovacie zariadenie CareLink sa musí používať len na získavanie informácií z kompatibilných implantovateľných pomôcok od spoločnosti Medtronic. Monitorovacie zariadenie CareLink je určené na použitie len v rámci krajiny, v ktorej bolo predpísané.

Implantovateľné zariadenie Reveal LINQ™ LNQ11 na monitorovanie srdcovej činnosti a zariadenie Pacientsky ovládač

Implantovateľné zariadenie Reveal LINQ na monitorovanie srdcovej činnosti je monitorovací systém aktivovaný pacientom aj automaticky, ktorý zaznamenáva podkožné EKG a je indikované v týchto prípadoch:

- u pacientov trpiacich klinickými príznakmi alebo stavmi so zvýšeným rizikom srdcových arytmií,
- u pacientov s prechodnými príznakmi, ako sú závraty, palpitácia, synkopa a bolesť hrudníka, ktoré môžu naznačovať srdcovú arytmiu.

Pomôcka nebola testovaná konkrétne na pediatrické použitie.

K možným rizikám zavedenia implantovateľného zariadenia Reveal LINQ na monitorovanie srdcovej činnosti patria okrem iných infekcia v mieste chirurgického zákroku, migrácia pomôcky, erózia pomôcky cez pokožku alebo citlivosť voči materiálu pomôcky.

Liečba pomocou implantovateľného zariadenia Reveal LINQ na monitorovanie srdcovej činnosti je dostupná na lekárske predpis. Liečba nie je vhodná pre každého. O vhodnosti liečby sa poraďte so svojim lekárom. Lekár by mal s vami prediskutovať všetky možné výhody a riziká. Hoci je liečba pre mnohých pacientov prínosná, výsledky sa líšia.

Bližšie informácie o pokynoch na používanie, indikáciách, kontraindikáciách, výstrahách, upozorneniach a potenciálnych komplikáciách alebo nežiaducich účinkoch nájdete v príručke k pomôcke. Ďalšie informácie vám poskytne spoločnosť Medtronic na čísle 1 (800) 328-2518 alebo navštívte webovú lokalitu spoločnosti Medtronic na adrese www.medtronic.com.

Upozornenie: Federálny zákon (USA) umožňuje predaj tejto pomôcky iba prostredníctvom alebo na objednávku lekára.

Medtronic

Služby pre pacientov

Medtronic
8200 Coral Sea St. NE MVS14
Mounds View, MN 55112
Bezplatná linka pre pacientov:
1 (800) 551-5544
Fax: (763) 367-5809
od 7.00 do 19.00 CST, pondelok až piatok

medtronic.com

UC201602395SK © Medtronic 2015.
Minneapolis, MN. Všetky práva vyhradené.
Vytlačené v EU 10/2015